

Універсальні серветки для безпечного очищення та дезінфекції делікатних робочих зон з антибактеріальним ефектом.

Унікальна формула активної речовини дозволяє ефективно очищати поверхні від пилу та органічних забруднень, видаляти масляні та жирні плями, очищати оббивний матеріал. Серветки безпечні для шкіряних, вінілових і пластикових матеріалів.

Форма випуску:

- Пластиковий пакет на 160 серветок у рулоні
- Пластиковий контейнер для зручного використання серветок

Спосіб застосування:

Обробіть поверхню вологою серветкою **EZMEDIX W-3**. При необхідності використовуйте другу серветку в місцях регулярного забруднення, повторюйте процедуру очищення при потребі. Активна речовина випаровується.

Особливості:

EZMEDIX W-3 — активна речовина має залишкову дію. Не містять спирту, який викликає висихання та розтріскування оббивки.

Інструкція з встановлення рулону в контейнер з клапаном:

1. Розпакуйте пластиковий пакет і вийміть рулон.
2. Встановіть рулон в контейнер і злегка витягніть серветку з середини рулону.
3. Не відриваючи внутрішню серветку від рулону, протягніть її через отвір з клапаном на кришці.
4. Прикріпіть кришку до контейнера. Зберігайте серветки в контейнері зі закритим клапаном для збереження дезінфікуючого ефекту.

