



ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБУ

	ПРИЗНАЧЕННЯ ЗАСОБУ	<ul style="list-style-type: none">Засіб призначений для попереднього очищення роторних інструментів, що використовуються у стоматологічній практиці. Він ефективно руйнує біологічний матеріал, перетворюючи його на прості хімічні сполуки, тим самим готуючи інструментарій до подальших етапів дезінфекції та стерилізації.
	СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ	<ul style="list-style-type: none">Стоматологічна практика.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ**Приготування:**

Засіб готовий до використання. Переконайтеся, що ви працюєте в добре провітрюваному приміщенні та використовуйте засоби індивідуального захисту (рукавички, захисні окуляри).

Занурення інструментів:

Відразу після використання повністю занурте роторні інструменти в ємність із засобом. Переконайтеся, що всі робочі поверхні інструментів покриті розчином.

Час експозиції:

Залиште інструменти в засобі на **10 хв – 15 хвилин**. Засіб починає діяти одразу, руйнуючи біологічний матеріал.

Промивання:

Після закінчення часу експозиції ретельно промийте інструменти під проточною водою, щоб повністю видалити залишки засобу та розчиненого біологічного матеріалу.

Подальша обробка:

Промиті інструменти готові до етапів дезінфекції та стерилізації відповідно протоколів та рекомендацій виробника інструментів.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Тільки для професійного використання.
- Використовуйте засіб лише згідно з цією інструкцією.
- Рекомендується працювати в захисних рукавичках та окулярах.
- Уникайте потрапляння засобу в очі, на шкіру та слизові оболонки. У разі контакту - ретельно промийте уражену ділянку великою кількістю води.
- Не змішуйте засіб з іншими дезінфікуючими або миючими засобами.
- Не вживати всередину. У разі ковтання - негайно зверніться до лікаря.
- Зберігайте в недоступному для дітей місці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

- Зберігайте засіб в оригінальній щільно закритій упаковці.
- Уникайте впливу прямих сонячних променів та надмірних температур.
- Зберігайте при температурі від 0°C до +30°C.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

24 місяці з дати виробництва.

Дата виробництва та номер партії вказані на упаковці.

СКЛАД

Відповідає аркушу безпеки: Неіоногенні поверхнево-активні речовини <5%, ензими, інгібітор корозії, піногасник, допоміжні речовини.

Хіміко-фізичні дані: Значення pH в межах 9,5-11 при 20°C

ЄМНІСТЬ: 1 Л, 5 Л

Медичний виріб класу I

EZMEDIX®